

## Guanti protettivi in situazioni critiche



Suggerimenti per un  
uso corretto

**reflexx**<sup>®</sup>

I N S A F E H A N D S

## L'OMS invita l'industria e i governi ad aumentare la produzione del 40% per soddisfare la crescente domanda globale

L'organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che gravi e crescenti interruzioni della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) - causate dall'aumento della domanda, dall'acquisto di panico, dall'accapparramento e dall'uso improprio - stanno mettendo a rischio l'incolumità delle persone direttamente coinvolte in situazioni critiche.

Organizzazione Mondiale della Sanità  
Ginevra, 3 Marzo 2020

Situazioni come quella descritta dall'OMS impongono alcune riflessioni tra cui considerare SOLUZIONI ALTERNATIVE per soddisfare le aumentate richieste di guanti e contribuire così al contenimento del consumo improprio di beni indispensabili per la protezione delle persone.

## Non solo monouso

### Guanto riutilizzabile



DPI che possono essere igienizzati in modo tale da essere utilizzati più volte.

### Guanto monouso



DPI per durata d'uso limitata - da utilizzarsi una sola volta.

## DPI Cat. III, rischi gravi

### Reflexx 101 HD

Guanti in neoprene + lattice



EN ISO 374-1:2016/Type B



JKLNPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN 388:2016



2121X

**Peso**  
105,0 gr M +/- 5,0 al paio  
**Spessore**  
0,68 mm al palmo +/- 0,05  
**Lunghezza**  
32 cm  
**Taglie**  
M / L / XL / XXL



\* 5 masterbag da 10 confezioni cad.

### Reflexx 97 HD

Guanti in nitrile



EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN 388:2016



2121X

**Peso**  
63,0 gr M +/- 5,0 al paio  
**Spessore**  
0,40 mm al palmo +/- 0,05  
**Lunghezza**  
33 cm  
**Taglie**  
M / L / XL / XXL



\* 5 masterbag da 10 confezioni cad.

# reflexx®

I N S A F E H A N D S

## Reflexx 94

Guanti in lattice



EN ISO 374-1:2016/Type B



LKG

EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016



1010X

**Peso**  
80,0 gr M +/- 5,0 al paio  
**Spessore**  
0,50 mm al palmo +/- 0,05  
**Lunghezza**  
33 cm  
**Taglie**  
S / M / L / XL



\* 5 masterbag da 10 confezioni cad.

## Reflexx 95 FH

Guanti in nitrile senza felpatura



EN ISO 374-1:2016/Type B



KOPT

EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016



2101X

**Peso**  
44,0 gr M +/- 5,0 al paio  
**Spessore**  
0,22 mm al palmo +/- 0,03  
**Lunghezza**  
33 cm  
**Taglie**  
S / M / L / XL



\* 5 masterbag da 10 confezioni cad.

## DPI Cat. I, rischi minori

### Reflexx 90

Guanti in lattice - Felpati



**Peso**  
50,0 gr M +/- 3,0 al paio  
**Spessore**  
0,32 mm al palmo +/- 0,04  
**Lunghezza**  
30 cm  
**Taglie**  
S / M / L / XL



\* 12 masterbag da 10 confezioni cad.

### Reflexx 92

Guanti in lattice - Satinati



**Peso**  
50,0 gr M +/- 3,0 al paio  
**Spessore**  
0,30 mm al palmo +/- 0,04  
**Lunghezza**  
30 cm  
**Taglie**  
S / M / L / XL



\* 12 masterbag da 10 confezioni cad.

**A differenza dei guanti monouso, i guanti riutilizzabili possono essere lavati e sanificati**



## Lavaggio con ACQUA e SAPONE

**reflexx**<sup>®</sup>

I N S A F E H A N D S


### Il lavaggio e la sanificazione dei DPI riutilizzabili con acqua e sapone

Lavare con acqua e sapone neutro alla temperatura di 60°C per rimuovere impurità immergendo completamente i guanti.

Risciacquare abbondantemente sotto acqua corrente.

Lasciare asciugare i guanti in ambiente aerato, all'ombra e a temperatura ambiente lontano da fonti di calore.

Una volta eseguito quanto sopra, è possibile, previo verifica di assenza di fori e fessurazioni, iniziare o riprendere l'attività lavorativa utilizzando i DPI prescelti ed indicati nel DVR (Documento di Valutazione del Rischio) della propria postazione.

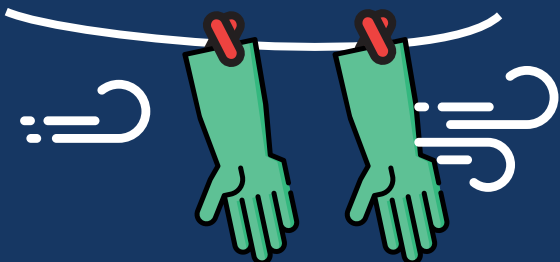

## Lavaggio con GEL ALCOLICO

Tempo necessario



**reflexx**<sup>®</sup>

I N S A F E H A N D S

### Il lavaggio e la sanificazione dei DPI riutilizzabili con gel alcolico

Detergere con gel disinfettante a base alcolica per 30" tutta la superficie interna ed esterna, risciacquare in acqua pulita per la detersione dei residui di alcool che potrebbero danneggiare guanti e compromettere il riutilizzo – lasciare asciugare i guanti in ambiente aerato, all'ombra e a temperatura ambiente.

1. Versa una quantità di soluzione sufficiente sul palmo della mano

2. Friziona le mani palmo contro palmo

3. Friziona il palmo sopra il dorso e viceversa

4. Friziona palmo contro palmo con le dita intrecciate

5. Friziona le dita contro il palmo opposto e viceversa

6. Friziona il pollice destro nel palmo sinistro e viceversa


7. Friziona ruotando avanti e indietro le dita nel palmo della mano e viceversa

8. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano viceversa

9. Una volta asciutti, i guanti sono puliti

Una volta eseguita la sanificazione dei DPI, è possibile iniziare o riprendere l'attività lavorativa utilizzando i DPI prescelti ed indicati nel DVR (Documento di Valutazione del Rischio) della propria postazione.

**Simile procedura è indicata dall'OMS  
per la pulizia delle mani**

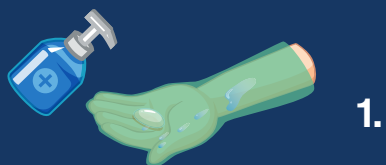


1.



2.



3.

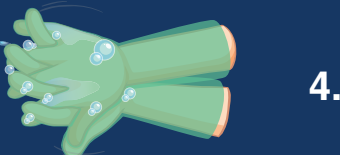


4.




5.



6.

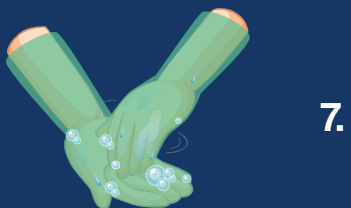

7.

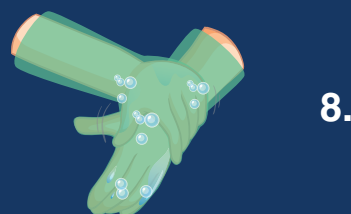


8.



9.

## RIMOZIONE corretta dei GUANTI

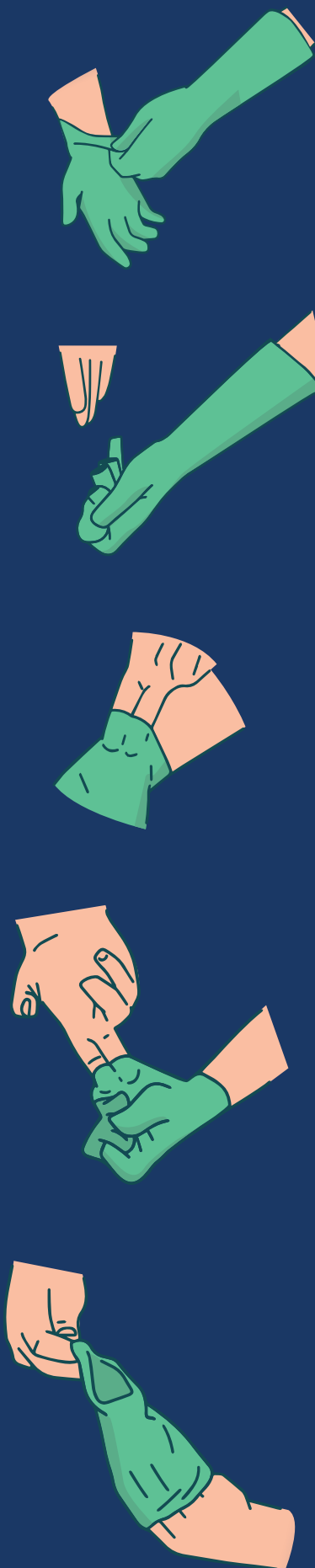

**1.** Pizzica e afferra il guanto nella parte sottostante il bordino arrotolato

**2.** Risvolta il guanto fino alla completa sfilatura

**3.** Infila due dita sotto l'altro guanto senza toccare la parte esterna

**4.** Risvolta il guanto fino a sfilarlo completamente

**5.** Completato lo sfilamento, è possibile eseguire lo stesso metodo di sanificazione anche all'interno dei guanti come riportato nella pagina precedente

Oltre ad un'ampia gamma di guanti monouso e riutilizzabili, Reflexx offre **guanti supportati** specifici per lavorazioni meccaniche di II categoria di rischio – Rischio Intermedio certificati EN 388/2016.

## Guanti supportati

**Reflexx N12**  
Guanti in nitrile



EN 388:2016



2131X

**Lunghezza**  
24 cm  
**Taglie**  
S / M / L / XL / XXL



\* 5 masterbag da 10 confezioni cad.

**Reflexx PU13**  
Guanti in poliuretano



EN 388:2016



2121X

**Lunghezza**  
24 cm  
**Taglie**  
S / M / L / XL / XXL



\* 5 masterbag da 10 confezioni cad.

**Reflexx PU14**  
Guanti in poliuretano



EN 388:2016



2131X

**Lunghezza**  
24 cm  
**Taglie**  
S / M / L / XL / XXL



\* 5 masterbag da 10 confezioni cad.

**Reflexx PU15**  
Guanti in poliuretano



EN 388:2016



2121X

**Lunghezza**  
24 cm  
**Taglie**  
S / M / L / XL / XXL



\* 5 masterbag da 10 confezioni cad.



---

[WWW.REFLEXX.COM](http://WWW.REFLEXX.COM)

---

REFLEXX S.p.a.  
Via Passeri, 2 46019 - VIADANA ( MN) - ITALY - Ph. +39 0375 758891 - Fax +39 0375 464504 - [contatti@reflexx.com](mailto:contatti@reflexx.com)